

JERINGAS DE UN SOLO USO DE 1 mL (JERINGAS DE INSULINA DE UN SOLO USO) (AGUJA 30G X 1/2")

REF.: JRG-001

Para administración de insulina.



1. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Dispositivo médico estéril, diseñado para la administración subcutánea de insulina u otros medicamentos compatibles. Cuenta con aguja fija para mayor precisión en la dosificación.

- Capacidad: 1 mL
- Tipo de aguja: Fija
- Calibre: 30G
- Longitud de aguja: 1/2" (12.7 mm)
- Graduación: 0.02 mL (U-100)

Registro Sanitario N°. 17645-DME-1124

Período de vida útil: 5 años

Clase: Invasivo

Método de esterilización compatible:

- Óxido de etileno (EO)

Procedencia: China

2. MATERIAL

- Cilindro: Polipropileno (PP)
- Émbolo: Caucho libre de látex
- Aguja: Acero inoxidable

3. PRESENTACIÓN

Envase primario:

1 unidad

Envase secundario:

100 unidades / caja cartón

Envase terciario:

3200 unidades / caja de cartón

MARCA

DHISVE
www.dhisve.com

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR

IMPORTACIONES MEDICALSOLUTIONS CIA. LTDA

DIRECCIÓN

Francisco de Orellana LT208 y Fernando de Magallan

CONTACTO:

+593 95 862 3147 contacto@dhisve.com

Medical Solutions

JERINGAS DE UN SOLO USO DE 1 mL (JERINGAS DE INSULINA DE UN SOLO USO) (AGUJA 30G X 1/2")

REF.: JRG-001

4. INDICACIONES DE USO

- Retire el protector, cargue el medicamento y expulse el aire; ajuste la aguja y la jeringa en caso de fuga.
- Para inyección subcutánea.

5. ADVERTENCIAS

- Úselo inmediatamente después de abrir el paquete unitario.
- Debe ser manipulado únicamente por personal con conocimientos médicos.
- Asegurar una correcta conexión entre la aguja y la jeringa para evitar fugas o contaminación.
- El uso inadecuado puede provocar infecciones u otras complicaciones.

6. PRECAUCIONES

- Esterilizado con EO, no tóxico, no pirogénico.
- El operador del producto debe contar con conocimientos médicos relacionados.
- Vida útil de cinco años después de la esterilización. Preste atención a la fecha de caducidad. No utilizar después de vencido.
- No utilizar si el empaque está dañado o abierto, o si el protector está retirado.
- Usar inmediatamente después de abrir el empaque.
- De un solo uso. Desechar después de su uso.
- No usar junto con hidrato de cloral u otros medicamentos no disueltos.
- Prohibido su uso en personas con alergia al caucho natural.



7. APLICACIONES

- Utilizado en la aplicación de insulina, anticoagulantes, vacunas y otros fármacos compatibles con la vía subcutánea.
- Adecuado para su uso en entornos hospitalarios, clínicos y domiciliarios bajo la supervisión de personal capacitado.
- Permite la dosificación precisa de medicamentos en pequeños volúmenes.

8. SEGURIDAD DE USO

- Uso en procedimientos médicos y de enfermería que requieran inyección subcutánea.
- Aplicación de vacunas, insulina u otros fármacos indicados para este tipo de inyección.
- Uso en hospitales, clínicas, consultorios y atención domiciliaria bajo supervisión profesional.
- Indicado para la administración segura y precisa de pequeñas dosis de medicamentos.

9. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- Proteger de la presión, la luz solar y el agua de lluvia durante el transporte.
- Almacenar en un ambiente limpio y seco, sin aire corrosivo.
- Almacenar en humedad relativa menor al 80%, sin gases corrosivos, en un ambiente fresco, seco, bien ventilado y limpio.

Edición: 03/2026

MARCA

DHISVE
www.dhisve.com

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR

IMPORTACIONES MEDICALSOLUTIONS CIA. LTDA

DIRECCIÓN

Francisco de Orellana LT208 y Fernando de Magallan

CONTACTO:

+593 95 862 3147 contacto@dhisve.com

Medical Solutions