

BOLSA DE ESTERILIZACIÓN AUTOSELLADA (135 mm X 280 mm)

REF.: BEST-003

Empaque para procesos de esterilización.



1. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Este papel es producido mediante un sistema de alta tecnología, de color blanco, y ha sido desarrollado para garantizar una alta protección antibacteriana.

Medidas: 135 mm X 280 mm.

Registro Sanitario N°. 16935-DME-0724

Período de vida útil: 5 años

Clase: No invasivo

Método de esterilización compatible:

- Vapor
- Óxido de etileno (EO)

Procedencia: China



2. MATERIAL

- Film transparente laminado (color azul)
- Papel grado médico Arjo Paper de 60 g/m².
- Película especial de PET y CPP
- Adhesivo médico (en modelos autosellados)
- Indicador químico de esterilización:
 - EO (rosado cambia a amarillo)
 - Vapor (azul cambia a negro)

3. PRESENTACIÓN

Envase primario:

200 unidades / Caja de cartulina

Envase secundario:

2000 unidades / Caja de cartón

BOLSA DE ESTERILIZACIÓN AUTOSELLADA

(135 mm X 280 mm)

REF.: BEST-003

4. INDICACIONES DE USO

- Seleccione la bolsa para esterilización adecuada de acuerdo con el tamaño de los artículos a esterilizar e introdúzcalos en su interior.
- Coloque los dispositivos cortopunzantes o de formas especiales en la posición correcta para un desprendimiento seguro al abrir.
- Retire la tira protectora y selle la bolsa; marque el registro de los detalles de la esterilización para su trazabilidad.
- Coloque la bolsa sellada correctamente en el esterilizador de vapor o de óxido de etileno (EO).
- Después de un ciclo de esterilización, verifique el cambio de color: si la esterilización se realizó correctamente, el indicador cambiará de azul claro inicial a gris oscuro/negro para esterilización por vapor, y de rosado inicial a amarillo/marrón para esterilización por óxido de etileno (EO).
- Abra la bolsa siguiendo la dirección indicada en el empaque y retire los artículos esterilizados.

5. ADVERTENCIAS

- Antes de iniciar el proceso de esterilización, verifique que la bolsa autosellable esté llena como máximo hasta 3/4 de su capacidad, de manera que los sellos no queden obstruidos en los bordes.
- Cubra los extremos y las superficies cortantes de los instrumentos con la protección adecuada.
- Coloque los instrumentos con el mango orientado hacia la apertura de la bolsa autosellable.
- No utilice sustancias disolventes sobre la bolsa autosellable.
- Cualquier impresión o información debe colocarse en una etiqueta adherida al lado de papel o film; no escriba directamente sobre la bolsa autosellable y procure extremar las precauciones para evitar contaminación durante su uso.
- Verifique cuidadosamente el peso de los instrumentos a esterilizar a fin de evitar riesgos de rotura.

6. PRECAUCIONES

- Está prohibido utilizar las bolsas autosellables si se encuentran dañadas.
- Las bolsas autosellables solo deben utilizarse después de verificar que no exista polvo en su empaque; en caso de uso parcial, deben cerrarse herméticamente en su envase plástico.

7. APLICACIONES

- Está diseñada para el envasado, esterilización y conservación de instrumental en condiciones de esterilidad hasta su uso, en diferentes sectores médicos.

8. SEGURIDAD DE USO

- Producto de uso único, no reutilizar.
- No usar si la bolsa está dañada, húmeda o abierta.
- No esterilizar instrumental mojado..
- Verifique cuidadosamente el peso de los instrumentos a esterilizar para evitar riesgos de rotura.

9. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- Las bolsas autosellables deben mantenerse alejadas de la luz solar y almacenarse en un lugar seco.



Edición: 02/2026