

BATA DE CIRUJANO TALLA ESTÁNDAR

REF.: DCE-001

Uso: Protección



1. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

bata apertura posterior con cruce cuello redondo con ribete tiras de amarre y cintas de sujeción a nivel de la cintura, manga larga con puño de algodón, Largo 125 cm x 153 ancho, largo de manga 62 cm

Período de vida útil: 3 años

Registro Sanitario N°. DM-1706-01-10

Clase: No invasivo

Método de esterilización: Óxido de etileno / Estéril

Categoría: Batas

2. MATERIAL

Tela no tejida, SMS, polipropileno 100%, gramaje mínimo 35 g/m2.

3. PRESENTACIÓN

Envase primario: 1 unidad / Funda grado médico para esterilización.

Envase secundario: 50 unidades / Caja de cartón.

4. INDICACIONES DE USO

PASO 1: Abre el empaque sin tocar el interior de la bata.

PASO 2: Sostén la bata desde el exterior y entra los brazos sin tocar la parte frontal.

PASO 3: Asegura los lazos o velcros en la espalda o cuello según el diseño.

PASO 4: Evita tocar superficies no estériles una vez puesta.

5. ADVERTENCIAS

- No utilice el producto una vez que haya expirado la fecha de caducidad indicada en el empaque.
- Este producto está diseñado para un único uso; no reutilizar.
- Destruir el producto conforme a las normativas ambientales y de salud vigentes.
- En caso de devolución, comuníquese con su representante comercial.



MARCA

DHISVE

PROCEDENCIA

QUITO
ECUADOR

www.dhisve.com

FABRICANTE

Compañía Limitada Famedic

DIRECCIÓN

Sebastián de Benalcázar OE7-264
y Autopista General Rumiñahui.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Importaciones Medical Solutions CIA. LTDA.



CONTACTO:

+593 95 862 3147

El Sistema de Gestión de Calidad de COMPAÑÍA LIMITADA FAMEDIC está certificado bajo la norma ISO 13485 por ICONTEC, organismo acreditado por el SAE. Este certificado es reconocido por la ARCSA, autoridad sanitaria en el Ecuador.

BATA DE CIRUJANO TALLA ESTÁNDAR

REF.: DCE-001

6. PRECAUCIONES

- Inspeccione visualmente el empaque antes de usarlo. No utilizar si está perforado, roto o presenta cualquier señal de daño.
- Manipule el producto con manos limpias y guantes para prevenir contaminaciones externas.
- Para evitar daños al contenido, abrir la funda únicamente en la zona designada del sellado.
- No utilizar objetos cortantes que puedan comprometer la integridad del producto.
- Evite el contacto con superficies contaminadas.



7. APLICACIONES

- Prenda de protección médica de un solo uso, diseñada para mantener la esterilidad en procedimientos clínicos y quirúrgicos.
- Fabricada con material no tejido de alta resistencia y barrera contra fluidos, actúa como barrera contra salpicaduras, líquidos peligrosos y agentes químicos presentes en tratamientos.
- Puede utilizarse en áreas de hospitalización general, emergencias, unidades de imagen, laboratorios y salas de observación.

8. SEGURIDAD DE USO

- Es una prenda de protección especial que protege al personal de salud (y en algunos casos a cuidadores) contra la exposición a fluidos.
- Verificar que la bata cubra la mayor parte del cuerpo para garantizar comodidad y privacidad.
- Asegurarse de que no se manipule la prenda de forma inadecuada que pueda comprometer su higiene o integridad.
- Retirar la bata en caso de deterioro visible, contaminación con fluidos o presencia de signos de irritación en la piel.

9. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- Mantener en su empaque original hasta el momento de uso.
- Consérvese en un ambiente limpio, seco y libre de polvo, a una temperatura no mayor a 30°C. Proteger de la luz y humedad.

MARCA

DHISVE

PROCEDENCIA

QUITO
ECUADOR

www.dhisve.com

FABRICANTE

Compañía Limitada Famedic

DIRECCIÓN

Sebastián de Benalcázar OE7-264
y Autopista General Rumiñahui.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Importaciones Medical Solutions CIA. LTDA.



CONTACTO:

+593 95 862 3147

El Sistema de Gestión de Calidad de COMPAÑÍA LIMITADA FAMEDIC está certificado bajo la norma ISO 13485 por ICONTEC, organismo acreditado por el SAE. Este certificado es reconocido por la ARCSA, autoridad sanitaria en el Ecuador.

Edición: 02/2026