

MANGA TUBO TOMÓGRAFO (80 cm x 8 cm)

REF.: MANG-001

Uso: Recolección de fluidos corporales durante el parto

1. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Elaborado en tela no tejida SMS 35 gramos 100% polipropileno repelente, antiestática resiste a la abrasión de 80 cm de largo x 8 cm ancho con elástico en la parte superior, estéril, descartable

Período de vida útil: 3 años

Registro Sanitario N°. DM-1706-01-10

Clase: No invasivo

Método de esterilización: Óxido de etileno / Estéril

Categoría: Fundas-bolsas

2. MATERIAL

Tela no tejida SMS 35 gramos, repelente , antiestática.

3. PRESENTACIÓN

Envase primario: 1 par / Funda grado médico para esterilización.

Envase secundario: 200 pares / Caja de cartón.

4. INDICACIONES DE USO

PASO 1: Verifica que el cobertor sea del tamaño adecuado

PASO 2: Asegúrate de que cubra completamente el tubo del tomógrafo

PASO 3: Desliza o envuelve el cobertor alrededor del tubo sin forzarlo, si tiene elástico, ajústalo a los bordes para que no se mueva.

5. ADVERTENCIAS

- No utilice el producto una vez que haya expirado la fecha de caducidad indicada en el empaque.
- Este producto está diseñado para un único uso; no reutilizar.
- Destruir el producto conforme a las normativas ambientales y de salud vigentes.
- En caso de devolución, comuníquese con su representante comercial.



MARCA
DHISVE

PROCEDENCIA
QUITO
ECUADOR

www.dhisve.com

FABRICANTE Compañía Limitada Famedic

DIRECCIÓN Sebastián de Benalcázar OE7-264
y Autopista General Rumiñahui.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO Importaciones Medical Solutions CIA. LTDA.

CONTACTO:
+593 95 862 3147

Empresa
Certificada



DM-CER1008093

MANGA TUBO TOMÓGRAFO (80 cm x 8 cm)

REF.: MANG-001

6. PRECAUCIONES

- Inspeccione visualmente el empaque antes de usarlo. No utilizar si está perforado, roto o presenta cualquier señal de daño.
- Manipule el producto con manos limpias y guantes para prevenir contaminaciones externas.
- Para evitar daños al contenido, abrir la funda únicamente en la zona designada del sellado.
- No utilizar objetos cortantes que puedan comprometer la integridad del producto.
- Evite el contacto con superficies contaminadas.



7. APLICACIONES

- Diseñada para uso de pacientes en hospitales, clínicas y centros de salud.
- Indicada para hospitalización, consultas médicas, procedimientos ambulatorios y prequirúrgicos.
- Brinda cobertura, comodidad y seguridad durante la estancia hospitalaria.
- Puede utilizarse en áreas de hospitalización general, emergencias, unidades de imagen, laboratorios y salas de observación.

8. SEGURIDAD DE USO

- Utilizar la bata únicamente para la protección y cobertura del paciente durante su estancia hospitalaria o procedimientos médicos.
- Colocar la prenda siguiendo las indicaciones de uso, asegurando que quede correctamente ajustada con las tiras de sujeción.
- Verificar que la bata cubra la mayor parte del cuerpo del paciente para garantizar comodidad y privacidad.
- Asegurarse de que el paciente no manipule la prenda de forma inadecuada que pueda comprometer su higiene o integridad.
- Retirar la bata en caso de deterioro visible, contaminación con fluidos o si el paciente presenta signos de irritación en la piel.

9. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- Mantener en su empaque original hasta el momento de uso.
- Almacenar en un lugar seco, limpio, y protegido de la luz solar directa, a una temperatura no mayor a 30°C y una humedad relativa no mayor a 65%.

MARCA

DHISVE

PROCEDENCIA

QUITO
ECUADOR

www.dhisve.com

FABRICANTE

Compañía Limitada Famedic

DIRECCIÓN

Sebastián de Benalcázar OE7-264
y Autopista General Rumiñahui.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Importaciones Medical Solutions CIA. LTDA.



CONTACTO:

+593 95 862 3147

Empresa
Certificada



DM-CER1008093