


SÁBANA PLANA DE 230 x 150 cm (1 PLAZA y 1/2)

REF.: SDP-005

Uso:
Protección

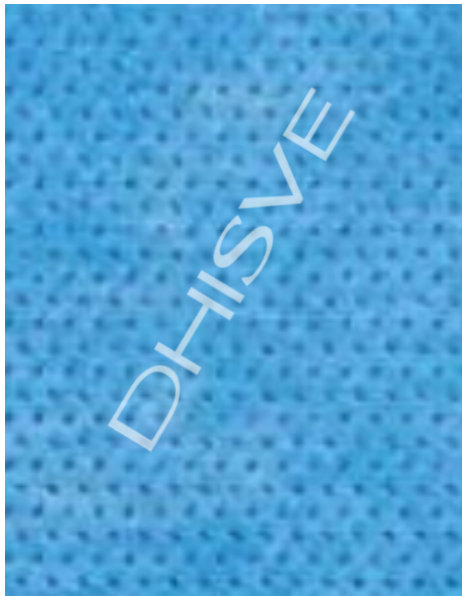

1. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Sábana para camilla plana sin elástico.
Largo 230 cm x 150 cm ancho.

Período de vida útil: 5 años

Registro Sanitario N°. 58-DMN-1117

Clase: No invasivo

Método de esterilización: No aplica / No estéril

Categoría: Sábanas

2. MATERIAL

Tela no tejida, SMS, polipropileno 100%, gramaje mínimo 35 g/m2.

3. PRESENTACIÓN

Envase primario: 10 unidades / Fundas impresas de baja densidad.

Envase secundario: 50 unidades / Caja de cartón.

4. INDICACIONES DE USO

PASO 1: Asegúrate de que la camilla esté limpia y desinfectada.

PASO 2: Extiende la sábana plana descartable sobre el colchón o camilla, centrada.

No tiene elásticos, así que debe quedar simplemente apoyada.

PASO 3: Alisa bien la superficie

Si es necesario, mete los bordes por debajo del colchón para que no se mueva.

PASO 4: Desechar el producto después de su uso.

5. ADVERTENCIAS

- No utilice el producto una vez que haya expirado la fecha de caducidad indicada en el empaque.
- Este producto está diseñado para un único uso; no reutilizar.
- Destruir el producto conforme a las normativas ambientales y de salud vigentes.
- En caso de devolución, comuníquese con su representante comercial.

MARCA

DHISVE

PROCEDENCIA

QUITO
ECUADOR

www.dhisve.com

FABRICANTE

Compañía Limitada Famedic

DIRECCIÓN

Sebastián de Benalcázar OE7-264
y Autopista General Rumiñahui.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Importaciones Medical Solutions CIA. LTDA.



CONTACTO:

+593 95 862 3147

El Sistema de Gestión de Calidad de COMPAÑÍA LIMITADA FAMEDIC está certificado bajo la norma ISO 13485 por ICONTEC, organismo acreditado por el SAE. Este certificado es reconocido por la ARCSA, autoridad sanitaria en el Ecuador.

SÁBANA PLANA DE 230 x 150 cm (1 PLAZA y 1/2)

REF.: SDP-005

6. PRECAUCIONES

- Inspeccione visualmente el empaque antes de usarlo. No utilizar si está perforado, roto o presenta cualquier señal de daño.
- Manipule el producto con manos limpias y guantes para prevenir contaminaciones externas.
- Para evitar daños al contenido, abrir la funda únicamente en la zona designada del sellado.
- No utilizar objetos cortantes que puedan comprometer la integridad del producto.
- Evite el contacto con superficies contaminadas.



7. APLICACIONES

- Se utilizan para mantener la higiene en áreas estériles o limpias, como quirófanos, laboratorios o zonas de aislamiento.
- Indicada para hospitalización, consultas médicas, procedimientos ambulatorios y prequirúrgicos.
- Es fundamental para prevenir infecciones, mantener un entorno estéril.
- Puede utilizarse en áreas de hospitalización general, emergencias, unidades de imagen, laboratorios y salas de observación.

8. SEGURIDAD DE USO

- Evita que la sábana cuelgue demasiado por los costados, ya que puede provocar tropiezos.
- Asegurarse que la sábana quede tensa y lisa, especialmente en tratamientos prolongados o donde el paciente se mueve.
- Desechar después de su uso. No reutilizar.

9. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- Mantener en su empaque original hasta el momento de uso.
- Consérvese en un ambiente limpio, seco y libre de polvo, a una temperatura no mayor a 30°C. Proteger de la luz y humedad.

MARCA

DHISVE

PROCEDENCIA

QUITO
ECUADOR

www.dhisve.com

FABRICANTE

Compañía Limitada Famedic

DIRECCIÓN

Sebastián de Benalcázar OE7-264
y Autopista General Rumiñahui.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Importaciones Medical Solutions CIA. LTDA.



CONTACTO:

+593 95 862 3147

El Sistema de Gestión de Calidad de COMPAÑÍA LIMITADA FAMEDIC está certificado bajo la norma ISO 13485 por ICONTEC, organismo acreditado por el SAE. Este certificado es reconocido por la ARCSA, autoridad sanitaria en el Ecuador.

Edición: 01/2026