

FALDA DE MUJER TALLA ESTÁNDAR (ROSADO)

REF.: FAL-003

Uso:
Protección



1. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Falda mujer elástico en la cintura y 4 tiras de amarre.

Período de vida útil: 5 años

Registro Sanitario N°. 58-DMN-1117

Clase: No invasivo

Método de esterilización: No aplica / No estéril

Categoría: Spa

2. MATERIAL

Tela no tejida SMMS 35 gramos, 100% polipropileno.

3. PRESENTACIÓN

Envase primario: 10 unidades / Fundas impresas de baja densidad.

Envase secundario: 100 unidades / Caja de cartón.

4. INDICACIONES DE USO

- Retirarse la ropa personal de la parte inferior del cuerpo.
- Lavarse las manos con agua y jabón o utilizar gel antibacterial antes de manipular la falda.
- Identificar la parte delantera y trasera de la prenda.
- Verificar que el elástico de la cintura y las tiras de ajuste estén en buen estado.
- Sostener la falda por la cintura e introducir primero una pierna y luego la otra.
- Subir la falda hasta la cintura.
- Ajustar el elástico y amarrar las tiras laterales para que la prenda quede firme y cómoda.
- Para retirarla, desatar las tiras laterales y deslizar la falda suavemente hacia abajo.

5. ADVERTENCIAS

- No utilice el producto una vez que haya expirado la fecha de caducidad indicada en el empaque.
- Este producto está diseñado para un único uso; no reutilizar.
- Destruir el producto conforme a las normativas ambientales y de salud vigentes.
- En caso de devolución, comuníquese con su representante comercial.

MARCA

DHISVE

PROCEDENCIA

QUITO
ECUADOR

www.dhisve.com

FABRICANTE

Compañía Limitada Famedic

DIRECCIÓN

Sebastián de Benalcázar OE7-264
y Autopista General Rumiñahui.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Importaciones Medical Solutions CIA. LTDA.



CONTACTO:

+593 95 862 3147

El Sistema de Gestión de Calidad de COMPAÑÍA LIMITADA FAMEDIC está certificado bajo la norma ISO 13485 por ICONTEC, organismo acreditado por el SAE. Este certificado es reconocido por la ARCSA, autoridad sanitaria en el Ecuador.

FALDA DE MUJER TALLA ESTÁNDAR (ROSADO)

REF.: FAL-003

6. PRECAUCIONES

- Inspeccione visualmente el empaque antes de usarlo. No utilizar si está perforado, roto o presenta cualquier señal de daño.
- Manipule el producto con manos limpias y guantes para prevenir contaminaciones externas.
- Para evitar daños al contenido, abrir la funda únicamente en la zona designada del sellado.
- No utilizar objetos cortantes que puedan comprometer la integridad del producto.
- Evite el contacto con superficies contaminadas.



7. APLICACIONES

- Se utilizan en tratamientos estéticos o de relajación para garantizar higiene, comodidad y privacidad.
- Indicada para evitar que se manche con aceites, cremas o barro, y para que el tratamiento sea más cómodo y efectivo.
- Para tratamientos más específicos (como masajes reductores o depilación).

8. SEGURIDAD DE USO

- Es de un solo uso, lo que garantiza limpieza para cada cliente.
- Para cubrir el cuerpo mientras esperas o te desplazas en el spa.
- La prenda protege tu piel, pero también permite acceso a zonas del cuerpo para el tratamiento.
- Retirar la prenda en caso de deterioro visible, contaminación con fluidos o si el paciente presenta signos de irritación en la piel.

9. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- Mantener en su empaque original hasta el momento de uso.
- Consérvese en un ambiente limpio, seco y libre de polvo, a una temperatura no mayor a 30°C. Proteger de la luz y humedad.

MARCA

DHISVE

PROCEDENCIA

QUITO
ECUADOR

www.dhisve.com

FABRICANTE

Compañía Limitada Famedic

DIRECCIÓN

Sebastián de Benalcázar OE7-264
y Autopista General Rumiñahui.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Importaciones Medical Solutions CIA. LTDA.



CONTACTO:

+593 95 862 3147

El Sistema de Gestión de Calidad de COMPAÑÍA LIMITADA FAMEDIC está certificado bajo la norma ISO 13485 por ICONTEC, organismo acreditado por el SAE. Este certificado es reconocido por la ARCSA, autoridad sanitaria en el Ecuador.

Edición: 03/2026