

MANDIL USO MÚLTIPLE (TIPO 2) (SIN BOLSILLO)

REF.: MO-003

Uso:
Protección



1. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Tela no tejida, SS/PP, polipropileno 100%, gramaje mínimo 40 g/m2, manga larga puño con elástico, cuello de algodón y broches en la parte delantera, sin bolsillos. Largo 100 cm x 153 ancho, largo de manga 63 cm.

Período de vida útil: 5 años

Registro Sanitario N°. 58-DMN-1117

Clase: No invasivo

Método de esterilización: No aplica / No estéril

Categoría: Batas

2. MATERIAL

Tela no tejida, SS/PP, polipropileno 100%, gramaje mínimo 40 g/m2.

3. PRESENTACIÓN

Envase primario: 15 unidades / Fundas impresas de baja densidad.

Envase secundario: 75 unidades / Caja de cartón.

4. INDICACIONES DE USO

PASO 1: Tomar el mandil por la parte interna, evitando tocar la superficie externa.

PASO 2: Introducir los brazos en las mangas.

PASO 3: Ajustar y abrochar correctamente en cuello y cintura.

PASO 4: Asegurarse de que cubra torso y brazos completamente.

5. ADVERTENCIAS

- No utilice el producto una vez que haya expirado la fecha de caducidad indicada en el empaque.
- Este producto está diseñado para un único uso; no reutilizar.
- Destruir el producto conforme a las normativas ambientales y de salud vigentes.
- En caso de devolución, comuníquese con su representante comercial.

MARCA

DHISVE

PROCEDENCIA

QUITO
ECUADOR

www.dhisve.com

FABRICANTE

Compañía Limitada Famedic

DIRECCIÓN

Sebastián de Benalcázar OE7-264
y Autopista General Rumiñahui.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Importaciones Medical Solutions CIA. LTDA.



CONTACTO:

+593 95 862 3147

El Sistema de Gestión de Calidad de COMPAÑÍA LIMITADA FAMEDIC está certificado bajo la norma ISO 13485 por ICONTEC, organismo acreditado por el SAE. Este certificado es reconocido por la ARCSA, autoridad sanitaria en el Ecuador.

MANDIL USO MÚLTIPLE (TIPO 2) (SIN BOLSILLO)

REF.: MO-003

6. PRECAUCIONES

- Inspeccione visualmente el empaque antes de usarlo. No utilizar si está perforado, roto o presenta cualquier señal de daño.
- Manipule el producto con manos limpias y guantes para prevenir contaminaciones externas.
- Para evitar daños al contenido, abrir la funda únicamente en la zona designada del sellado.
- No utilizar objetos cortantes que puedan comprometer la integridad del producto.
- Evite el contacto con superficies contaminadas.

7. APLICACIONES

- El uso del mandil es fundamental para la bioseguridad e higiene durante la atención de pacientes o la realización de actividades que impliquen riesgo de contaminación.
- Protege al profesional y al paciente de salpicaduras de saliva, sangre y otros fluidos.
- Reduce el riesgo de contaminación cruzada.
- Debe colocarse antes de atender al paciente y retirarse al finalizar.
- Durante todos los procedimientos clínicos (consulta, profilaxis, operatoria, cirugía, etc.)

8. SEGURIDAD DE USO

- Utilizar el mandil en áreas donde se requiera protección del usuario y del entorno.
- Debe estar limpio, íntegro y seco antes de colocarlo.
- Cambiarlo entre pacientes si está contaminado.
- No reutilizar mandiles desechables.
- No sacudir el mandil para evitar dispersar microorganismos.

9. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- Mantener en su empaque original hasta el momento de uso.
- Consérvese en un ambiente limpio, seco y libre de polvo, a una temperatura no mayor a 30°C. Proteger de la luz y humedad.



MARCA

DHISVE

PROCEDENCIA

QUITO
ECUADOR

www.dhisve.com

FABRICANTE

Compañía Limitada Famedic

DIRECCIÓN

Sebastián de Benalcázar OE7-264
y Autopista General Rumiñahui.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Importaciones Medical Solutions CIA. LTDA.



CONTACTO: +593 95 862 3147

El Sistema de Gestión de Calidad de COMPAÑÍA LIMITADA FAMEDIC está certificado bajo la norma ISO 13485 por ICONTEC, organismo acreditado por el SAE. Este certificado es reconocido por la ARCSA, autoridad sanitaria en el Ecuador.

Edición: 01-2026