

PANTALÓN CORTO SIMPLE TALLA ESTÁNDAR (BÓXER ADULTO TALLA ESTÁNDAR)

REF.: SPA-001

Uso:

Protección



1. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Pantalón corto con elástico en la cintura.

Largo 50 cm, cintura 60 cm con elástico.

Período de vida útil: 5 años

Registro Sanitario N°. 58-DMN-1117

Clase: No invasivo

Método de esterilización: No aplica / No estéril

Categoría: SPA

2. MATERIAL

Tela no tejida SMMS 35 gramos,
100% polipropileno.

3. PRESENTACIÓN

Envase primario: 25 unidades / Fundas impresas de baja densidad.

Envase secundario: 200 unidades / Caja de cartón.

4. INDICACIONES DE USO

- Retirarse la ropa personal de la parte inferior del cuerpo.
- Lavarse las manos con agua y jabón o utilice gel antibacterial antes de manipular el pantalón.
- Localizar la parte delantera y trasera del pantalón. Verificar que el elástico de la cintura esté en buen estado.
- Sostener el pantalón por la cintura.
- Introducir primero una pierna y luego la otra.
- Ajustar el elástico de la cintura hasta que quede cómodo y seguro.
- Retire el pantalón sujetándolo por la cintura y deslizándolo hacia abajo.

5. ADVERTENCIAS

- No utilice el producto una vez que haya expirado la fecha de caducidad indicada en el empaque.
- Este producto está diseñado para un único uso; no reutilizar.
- Destruir el producto conforme a las normativas ambientales y de salud vigentes.
- En caso de devolución, comuníquese con su representante comercial.

MARCA

DHISVE

PROCEDENCIA

QUITO
ECUADOR

www.dhisve.com

FABRICANTE

Compañía Limitada Famedic

DIRECCIÓN

Sebastián de Benalcázar OE7-264
y Autopista General Rumiñahui.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Importaciones Medical Solutions CIA. LTDA.



CONTACTO:

+593 95 862 3147

El Sistema de Gestión de Calidad de COMPAÑÍA LIMITADA FAMEDIC está certificado bajo la norma ISO 13485 por ICONTEC, organismo acreditado por el SAE. Este certificado es reconocido por la ARCSA, autoridad sanitaria en el Ecuador.

PANTALÓN CORTO SIMPLE TALLA ESTÁNDAR (BÓXER ADULTO TALLA ESTÁNDAR)

REF.: SPA-001

6. PRECAUCIONES

- Inspeccione visualmente el empaque antes de usarlo.
- No utilizar si está perforado, roto o presenta cualquier señal de daño.
- Manipule el producto con manos limpias y guantes para prevenir contaminaciones externas.
- Para evitar daños al contenido, abrir la funda únicamente en la zona designada del sellado.
- No utilizar objetos cortantes que puedan comprometer la integridad del producto.
- Evite el contacto con superficies contaminadas.



7. APLICACIONES

- Es una prenda de ropa interior liviana, usualmente hecha de material no tejido (como polipropileno), que se utiliza para preservar la higiene y la protección personal durante tratamientos de spa o estéticos.
- Indicada para evitar que se manche con aceites, cremas o barro, y para que el tratamiento sea más cómodo y efectivo.

8. SEGURIDAD DE USO

- Es de un solo uso, lo que garantiza limpieza para cada cliente.
- La pantaloneta no es para nadar ni para actividades físicas.
- La pantaloneta protege tu piel, pero también permite acceso a zonas del cuerpo para el tratamiento.
- Retirar la prenda en caso de deterioro visible, contaminación con fluidos o si el paciente presenta signos de irritación en la piel.

9. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- Mantener en su empaque original hasta el momento de uso.
- Consérvese en un ambiente limpio, seco y libre de polvo, a una temperatura no mayor a 30°C. Proteger de la luz y humedad.

MARCA

DHISVE

PROCEDENCIA

QUITO
ECUADOR

www.dhisve.com

FABRICANTE

Compañía Limitada Famedic

DIRECCIÓN

Sebastián de Benalcázar OE7-264
y Autopista General Rumiñahui.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Importaciones Medical Solutions CIA. LTDA.



CONTACTO:

+593 95 862 3147

El Sistema de Gestión de Calidad de COMPAÑÍA LIMITADA FAMEDIC está certificado bajo la norma ISO 13485 por ICONTEC, organismo acreditado por el SAE. Este certificado es reconocido por la ARCSA, autoridad sanitaria en el Ecuador.

Edición: 01/2026