

# TOP TALLA ESTÁNDAR

REF.: SPAN-008

**Uso:**  
Protección



## 1. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Top talla estándar con elástico en la parte superior e inferior.

**Período de vida útil:** 5 años

**Registro Sanitario N°.** 58-DMN-1117

**Clase:** No invasivo

**Método de esterilización:** No aplica / No estéril

**Categoría:** SPA

## 2. MATERIAL

Tela no tejida 100% polipropileno - color negro.

## 3. PRESENTACIÓN

**Envase primario:** 100 unidades / Fundas impresas de baja densidad.

**Envase secundario:** 600 unidades / Caja de cartón.

## 4. INDICACIONES DE USO

- Retirarse la ropa personal de la parte superior del cuerpo.
- Lavarse las manos con agua y jabón o utilizar gel antibacterial antes de manipular el top.
- Localizar la parte delantera y trasera de la prenda.
- Verificar que los elásticos de la parte superior e inferior estén en buen estado.
- Deslizar el top sobre el torso, colocando primero un brazo y luego el otro.
- Colocar la prenda correctamente y regular los elásticos para asegurar un ajuste cómodo y seguro.
- Retirar el top sujetándolo por el borde inferior y deslizando suavemente hacia arriba, pasando por el torso.

## 5. ADVERTENCIAS

- No utilice el producto una vez que haya expirado la fecha de caducidad indicada en el empaque.
- Este producto está diseñado para un único uso; no reutilizar.
- Destruir el producto conforme a las normativas ambientales y de salud vigentes.
- En caso de devolución, comuníquese con su representante comercial.

MARCA  
DHISVE

PROCEDENCIA  
QUITO  
ECUADOR

www.dhisve.com

FABRICANTE Compañía Limitada Famedic

DIRECCIÓN Sebastián de Benalcázar OE7-264  
y Autopista General Rumiñahui.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO Importaciones Medical Solutions CIA. LTDA.

CONTACTO: +593 95 862 3147

El Sistema de Gestión de Calidad de COMPAÑÍA LIMITADA FAMEDIC está certificado bajo la norma ISO 13485 por ICONTEC, organismo acreditado por el SAE. Este certificado es reconocido por la ARCSA, autoridad sanitaria en el Ecuador.

# TOP TALLA ESTÁNDAR

REF.: SPAN-008

## 6. PRECAUCIONES

- Inspeccione visualmente el empaque antes de usarlo. No utilizar si está perforado, roto o presenta cualquier señal de daño.
- Manipule el producto con manos limpias y guantes para prevenir contaminaciones externas.
- Para evitar daños al contenido, abrir la funda únicamente en la zona designada del sellado.
- No utilizar objetos cortantes que puedan comprometer la integridad del producto.
- Evite el contacto con superficies contaminadas.



## 7. APLICACIONES

- Se utilizan en tratamientos estéticos o de relajación para garantizar higiene, comodidad y privacidad.
- Indicada para evitar que se manche con aceites, cremas o barro, y para que el tratamiento sea más cómodo y efectivo.
- Para tratamientos más específicos (como masajes reductores o depilación).

## 8. SEGURIDAD DE USO

- Es de un solo uso, lo que garantiza limpieza para cada cliente.
- La prenda no es para nadar ni para actividades físicas.
- La prenda protege tu piel, pero también permite acceso a zonas del cuerpo para el tratamiento.
- Retirar la prenda en caso de deterioro visible, contaminación con fluidos o si el paciente presenta signos de irritación en la piel.

## 9. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- Mantener en su empaque original hasta el momento de uso.
- Consérvese en un ambiente limpio, seco y libre de polvo, a una temperatura no mayor a 30°C. Proteger de la luz y humedad.

MARCA  
DHISVE

PROCEDENCIA  
QUITO  
ECUADOR

www.dhisve.com

FABRICANTE Compañía Limitada Famedic  
DIRECCIÓN Sebastián de Benalcázar OE7-264  
y Autopista General Rumiñahui.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO Importaciones Medical Solutions CIA. LTDA.

CONTACTO: +593 95 862 3147

El Sistema de Gestión de Calidad de COMPAÑÍA LIMITADA FAMEDIC está certificado bajo la norma ISO 13485 por ICONTEC, organismo acreditado por el SAE. Este certificado es reconocido por la ARCSA, autoridad sanitaria en el Ecuador.

Edición: 03/2026